

# TEST DE SARCINĂ CLASIC - BANDĂ

20mIU/ml

# BARZA®

ACURATEȚE >99%



Testul de sarcină Barza este un test rapid care depistează prezența hormonului hCG (gonadotropină corionică umană) în urină, încă din prima zi de întârziere a ciclului menstrual. Testul poate fi utilizat în orice moment al zilei.

## CONȚINUTUL CUTIEI

- > Un plic cu testul tip bandă și desicant;
- > Instrucțiuni de utilizare.

## INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

- > Pregătiți un recipient curat și uscat pentru colectarea urinei;
- > Pentru a se efectua testarea, dispozitivul și urina trebuie să fie la temperatura camerei (15°-30°C).
- > Luați un ceas pentru a contoriza timpul necesar până la citirea rezultatului;
- > Verificați data expirării, înscrisă pe cutie. A nu se utiliza după această dată!
- > Nu folosiți testul dacă plicul este perforat sau desigilat;
- > Scoateți testul din plic chiar înainte de utilizare;

**IMPORTANT: Testul este de unică folosință!**

> Colectați urina într-un recipient curat și uscat. Testul poate fi efectuat în orice moment al zilei, dar prima urină de dimineață conține cel mai ridicat nivel de hCG.

> Scoateți testul din plic și aruncați desicantul.

> **Introduceți testul în urină cu vârful săgeții în jos, până la linia marcată cu MAX, timp de 3 secunde.**

> **Nu lăsați nivelul de urină să depășească linia marcată cu MAX, altfel testul nu va fi executat corect.**




## CITIREA REZULTATULUI

Așezați testul pe o suprafață plană, curată, uscată și neabsorbantă (cum ar fi deasupra recipientului pentru urină) și așteptați 3 minute afișarea rezultatului.

Rezultate pozitive se pot observa și într-un minut. Cu toate acestea, pentru a confirma un rezultat negativ, timpul complet pentru reacție este de 3 minute.

Rezultatul citit după 5 minute nu va fi considerat corect.

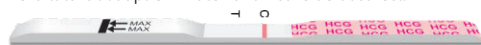

### NU SUNTEȚI ÎNSĂRCINATĂ

Apariția unei singure linii roz în zona de control (C) indică un rezultat negativ.



### SUNTEȚI ÎNSĂRCINATĂ

Apariția a două linii roz, o linie în zona de control (C) și o linie în zona de testare (T), indică un rezultat pozitiv.



### TESTUL NU ESTE VALID

Dacă în 5 minute nu apare nicio linie în zona de control (C) sau apare doar linia din zona de test (T), testul nu este valid. Repetați testarea cu un nou Test de sarcină Barza.

## SENSITIVITATE

Testul pentru sarcină Barza va detecta concentrația de hCG mai mare sau egală cu 20mIU/ml.

## SPECIFICITATE

Specificitatea testului de sarcină Barza a fost determinat prin studii de reactivitate încrucișată cu cantități cunoscute de hormon luteinizant (hLH), hormon foliculostimulant (hFSH) și hormon tiroid stimulant (hTSH).

Rezultate negative au fost obținute pentru toate testele efectuate cu 300 mIU/ml hLH, 300 mIU/ml hFSH și 100 mIU/ml hTSH.

## ÎNTREBĂRI FRECVENTE

### 1. Ce este hCG?

Gonadotropina corionică umană este un hormon produs de placenta, la scurt timp după concepție.

### 2. Cum funcționează Testul de sarcină Barza?

Testul Barza conține reactivi specifici care detectează chiar și un nivel scăzut de hCG (20mIU/ml) în urină. Atunci când urina intră în contact cu reactivul benzii de testare, apare o linie în zona de control (C) dacă nu sunteți însărcinată și două linii, dacă sunteți însărcinată. Cu ajutorul Testului de sarcină Barza poate fi depistată și sarcina extraterestră.

### 3. Când pot face testul?

Testul de sarcină Barza poate fi utilizat chiar din prima zi de întârziere a ciclului menstrual. Dacă utilizați testul înainte de ziua în care așteptați menstruația și obțineți un rezultat negativ, este posibil ca nivelul de hormon să nu fie suficient de ridicat pentru a fi detectat. În acest caz, repetați testarea după câteva zile.

### 4. Mă pot testa în orice moment al zilei?

Testul poate fi efectuat în orice moment al zilei, însă țineți cont că prima urină de dimineață conține cel mai ridicat nivel de hCG.

### 5. Ce factori pot influența rezultatul?

Medicamentele care conțin hCG pot determina un rezultat fals-pozitiv, la fel ca și unele probleme medicale ce pot cauza creșterea nivelului de hCG. Contraceptivele, antibioticele și consumul de alcool nu influențează precizia testului. Un rezultat fals-negativ poate să apară în cazul în care se testează o urină prea diluată sau dacă testarea se face prea devreme. În acest caz, vă recomandăm să faceți un nou Test Barza după câteva zile, utilizând prima urină de dimineață.

### 6. Ce trebuie să fac dacă rezultatul este pozitiv?

Dacă testul indică un rezultat pozitiv, înseamnă că a fost detectat un nivel ridicat de hCG în urină care indică faptul că sunteți însărcinată. În acest caz, trebuie să consultați medicul pentru confirmarea rezultatului și stabilirea următorilor pași.

### 7. Ce trebuie să fac dacă rezultatul este negativ?

În această situație, fie este posibil să nu fiți însărcinată, fie testul a fost făcut prea devreme. Este posibil să fi calculat greșit durata ciclului dvs. sau nivelul de hCG să fi fost prea scăzut pentru a vă oferi un rezultat pozitiv. Dacă următorul test va indica tot un rezultat negativ și menstruația nu a început, trebuie să consultați medicul.

### 8. Ce trebuie să fac dacă nu apare linia de control (C)?

În cazul în care nu apare linia de control (C) în max. 5 minute de la efectuarea testului, rezultatul este invalid. Trebuie să repetați testarea!

### 9. Am un ciclu menstrual neregulat. Cum știu când e momentul potrivit să fac testul?

Trebuie să vă testați luând în calcul cel mai lung ciclu din ultimele luni. Dacă rezultatul este negativ, testarea trebuie repetată după 48 de ore.

### 10. Cum interpretez rezultatul dacă apar două linii cu intensitate diferită a culorilor?

Prezența a două linii indică un rezultat pozitiv, indiferent de intensitatea culorii lor.

### 11. Este diferență mare între liniile de control ale două teste. Este aceasta o problemă?

Nu. Variațiile de culori ale liniei de control nu vor afecta rezultatul testului.

### 12. Se poate interpreta rezultatul testului după mai mult de 5 minute?

Nu. Rezultatul testului trebuie citit în 5 minute. Deși un rezultat pozitiv nu se va schimba în mai multe zile, un rezultat negativ se poate transforma într-unul fals-pozitiv după câteva minute de la terminarea perioadei de testare, ceea ce duce la o interpretare eronată. Este recomandată citirea rezultatului în perioada de testare de 5 minute, apoi trebuie aruncat testul pentru a evita confuziile.

### 13. Un fundal de culoare roz și o dungă verticală au apărut în perioada de testare. Este o problemă?

Nu. Fiecare probă de urină variază din punct de vedere chimic, precum și umiditatea din aerul camerei. Aceste variații pot duce la apariția unor dungă verticale și a unui fundal roz dar nu pot afecta rezultatul testului. Atăta timp cât linia de control apare în intervalul de 5 minute, testul este valid.

# TEST DE SARCINĂ CLASIC - BANDĂ

20mIU/ml

# BARZA®

ACURATEȚE >99%



## Testele de ovulație Barza

Află care sunt cele mai fertile zile pentru a rămâne însărcinată

⊕ Acuratețe >99%

⌚ Află în câteva minute



## Testele de fertilitate feminină & masculină Barza

Primul pas în evaluarea fertilității cuplului

⊕ Acuratețe >99%

⌚ Află în câteva minute

⌚ În orice moment al zilei




## Testele de sarcină ultrasensibile Barza

Află cu 5 zile mai devreme dacă ești sau nu însărcinată

⊕ Acuratețe >99%

📅 Află cu 5 zile mai devreme

⌚ În orice moment al zilei

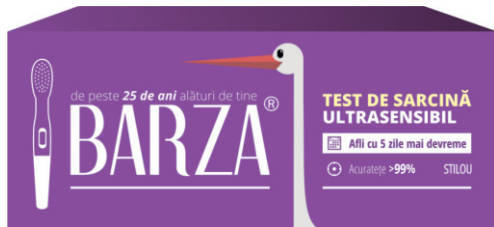

### BIBLIOGRAFIE

1. Canfield RE, Morgan Fj, Kammerman S, Bell JJ, Agosto GM. Studies of human chorionic gonadotropin. Recent Prog Horm Res. 1971; 27:121-164.
2. Ross GT. Clinical relevance of research on the structure of human chorionic gonadotropin. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1977; 129:795.

IVD	Dispozitiv medical de diagnostic in vitro	i	Citește instrucțiunile de utilizare	🕒	Data expirării	LOT	Numărul lotului	EC REP	Reprezentant autorizat	☀️	A se feri de lumina soarelui	🌡️	A se păstra între 4° - 30° C
Σ	Număr de teste per cutie	📅	Data fabricării	☔	A se feri de umezeală	🏭	Producător	②	Produs de unică folosință	REF	Număr de listă	Numai pentru uz extern, pentru auto-testare.	

**IMPORTATOR:** S.C. SELF CARE MEDICAL S.R.L.  
Str. Pipera – Tunari nr.51, Voluntari, jud. Ilfov.  
T: 021 264 39 50, E: office@scdg.ro, [www.testulbarza.ro](http://www.testulbarza.ro)

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Test de unică folosință. A nu se utiliza după data expirării. Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., No. 8, Lizhishan Road, Science City, Luogang district, Guangzhou, Guangdong, PRC (510663).  
A se păstra la o temperatură între 4°C-30°C. A nu se refrigera.

EC REP Qarad b.v.b.a., Ciplastraat 3, B-2440 Geel, Belgium

**TELVERDE**  
0800 822 792

🌡️ ② ⓘ IVD ⚠️ CE 0123 ☀️ ☔ REF W1-S(20mIU) ▼