

TEST DE MENOPAUZĂ

25mIU/ml

BARZA®

ACURATEȚE >99%



Testul de menopauză Barza este un test rapid care depistează prezența în urină a hormonului **FSH** (hormonul foliculostimulant). Este un dispozitiv medical de diagnostic **in vitro** care, printr-o determinare calitativă, vă poate spune dacă vă aflați în perioada de perimenopauză sau menopauză.

Creșterea nivelului **FSH** (hormonul foliculostimulant) este asociată cu reducerea nivelului de estrogeni și instalarea menopauzei la femei. De obicei, pe măsură ce femeia se apropie de vârsta menopauzei, nivelul de **FSH** crește de până la zece ori față de nivelurile normale (până la aproximativ 110mIU/mL, dar poate ajunge și până la 500mIU/mL) Nivelul de **FSH** poate rămâne constant timp de mai mulți ani după instalarea menopauzei.

CÂND AR TREBUI SĂ FOLOSIȚI TESTUL DE MENOPAUZĂ?

Perimenopauza este perioada de tranziție între perioada fertilă și menopauză, în care apar primele semne ale modificării funcției ovariene. Simptomele de perimenopauză variază de la femeie la femeie, dar cele mai comune sunt bufeurile, insomnia, ciclurile neregulate, schimbările bruște de dispoziție și oboseala. În timpul perimenopauzei au loc modificări hormonale care afectează ciclul menstrual lunar.

Aceste modificări ale funcției ovariene sunt lente și pot începe cu doi până la zece ani înainte de instalarea menopauzei. Testați-vă la fiecare 6-12 luni, începând cu vârsta de 35 de ani sau atunci când apar primele simptome de perimenopauză și discutați rezultatele testelor cu medicul dumneavoastră.

CONȚINUTUL CUTIEI

- > Un plic cu testul tip bandă și un plic cu desicant;
- Desicantul nu se va folosi la procedura de testare;
- > Instrucțiuni de utilizare.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- > Pregătiți un recipient curat și uscat pentru colectarea urinei;
- > Luați un ceas pentru a contoriza timpul necesar până la citirea rezultatului;
- > Verificați data expirării, înscrisă pe cutie. A nu se utiliza după această dată!
- > Nu folosiți testul dacă plicul este perforat sau desigilat;
- > Scoateți testul din plic chiar înainte de utilizare;

Important: Testul este de unică folosință.

- > Se recomandă folosirea primei urini de dimineață care conține cel mai ridicat nivel de **FSH**.
- > Nu consumați lichide în exces înainte de efectuarea testului!

Introduceți testul în urină, cu vârful săgeții în jos, până la linia marcată cu **MAX**, timp de **10-15** secunde.

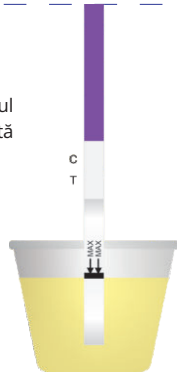

CITIREA REZULTATULUI


Așezați testul pe o suprafață plană și așteptați **3** minute afișarea rezultatului.

Rezultatul citit după 10 minute nu va fi considerat corect.



REZULTAT NEGATIV

Dacă pe test apare doar o linie colorată în zona de control (**C**), ori linia de test (**T**) este mai deschisă la culoare decât linia de control (**C**).

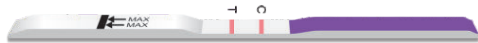

REZULTAT POZITIV

Dacă pe test au apărut două linii și linia de test (**T**) este la fel de colorată, ori mai închisă la culoare decât linia de control (**C**). Acest rezultat indică prezența **FSH** în urină la un nivel de peste 25 mIU/ml. În acest caz, este recomandată efectuarea unui al doilea test după 5-7 zile (de preferat la aceeași oră), pentru confirmarea rezultatului.

Dacă nivelul **FSH** rămâne ridicat pe toată durata ciclului menstrual, sunteți la perimenopauză.



TESTUL NU ESTE VALID

Dacă pe test nu apare nicio linie vizibilă, nici măcar în zona de control (**C**) sau apare doar o linie în zona de test (**T**).

TESTE DE FERTILITATE 2 + 1

TEST DE FERTILITATE MASCULINĂ

BARZA®

PRECIZIA >99%



ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Ce este FSH?

FSH (hormonul foliculostimulant) este un hormon produs de glanda pituitară. El controlează ciclurile menstruale și producerea foliculilor ovarieni la femei.

2. Care este rolul testului de menopauză Barza?

Testul de menopauză Barza determină nivelul FSH-ului (hormon de stimulare foliculară) din urină la un nivel de peste 25 mIU/ml și cu o precizie mai mare de 99%. Dacă nivelul din urină este egal cu sau de peste 25 mIU/ml peste valorile normale, atunci testul indică instalarea perimenopauzei sau menopauzei.

3. Am unele simptome specifice menopauzei, dar am încă ciclul menstrual. Sunt la menopauză?

Nu sunteți la menopauză dar este foarte probabil să vă aflați în perioada de perimenopauză. Multe femei pot prezenta simptome specifice menopauzei, având în continuare ciclul menstrual. Acest lucru înseamnă că ovulația se produce și, prin urmare, o sarcină încă este posibilă.

4. În cazul în care testul este pozitiv, mai pot rămâne însărcinată?

Chiar dacă testul de menopauză este pozitiv, sarcina este încă posibilă. Testul de menopauză Barza este doar un instrument care vă ajută să vă pregătiți pentru instalarea menopauzei. Putem afirma cu certitudine că menopauza s-a instalat abia după 12 luni consecutive fără menstruație.

5. Ce ar trebui să fac în cazul în care testul este pozitiv?

În cazul în care testul este pozitiv, înseamnă că organismul dumneavoastră produce un nivel ridicat de FSH (peste 25mIU/ml) și sunteți în perimenopauză. Totodată, nivelul hormonilor sexuali, precum estradiol, progesteron, testosteron, etc., a scăzut.

Consultați medicul și stabiliți căile de ameliorare a simptomelor și, mai ales, modul prin care le puteți trata: regim alimentar, tratament medicamentos, consiliere psihologică.

6. Sunt la vârsta menopauzei. Rezultatul testului este pozitiv, dar am în continuare cicluri regulate. De ce?

Un rezultat pozitiv indică doar că nivelul de FSH din urină este egal sau mai mare de 25mIU/ml și sunteți în perimenopauză. Menopauza, prin definiție, înseamnă absența menstruației timp de 12 luni consecutive. Un rezultat pozitiv nu vă spune exact când intrați la menopauză. Menopauza apare de obicei la femei între 45 și 55 de ani.

La majoritatea femeilor, perioada de perimenopauză durează aproximativ patru ani, timp în care nivelul de FSH rămâne ridicat în mod constant. De aceea puteți obține un rezultat pozitiv chiar dacă aveți cicluri menstruale regulate.

7. Ce ar trebui să fac în cazul în care testul este negativ?

În cazul în care testul este negativ, nivelul de FSH nu este ridicat, iar dumneavoastră nu sunteți, cel mai probabil, la menopauză.

Luați în considerare repetarea testului, 5-7 zile mai târziu.

8. Ce factori pot influența rezultatul acestui test?

Contraceptivele orale, plasturii contraceptivi, terapia de substituție hormonală (HRT), suplimentele cu estrogen sau alte forme de hormoni pot afecta rezultatul acestui test și pot da un rezultat fals negativ.

Tumorile ovariene și hipofizare pot determina rezultate false.

După folosirea mijloacelor contraceptive, ciclul menstrual poate fi neregulat și poate dura ceva timp până devine regulat din nou.

Vă recomandăm să așteptați până aveți două cicluri menstruale regulate, înainte de a utiliza Testul de menopauză Barza.

9. Pot utiliza acest test ca o metodă contraceptivă?

Testul de menopauză Barza nu este o metodă contraceptivă și nu trebuie să întrerupeți contraceptivele folosite pe baza rezultatelor acestui test.

IMPORTATOR: S.C. SELF CARE MEDICAL S.R.L.
Str. Pipera - Tunari nr.51, Voluntari, jud. Ilfov.
T: 021 264 39 50, E: office@scdg.ro, www.testulbarza.ro

TELVERDE
0800 822 792

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Test de unică folosință. A nu se utiliza după data expirării. Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., No. 8, Lizhishan Road, Science City, Luogang district, Guangzhou, Guangdong, PRC (510663). A se păstra la o temperatură între 4°C-30°C. A nu se refrigera.

EC REP Qarad b.v.b.a., Ciplastraat 3, B-2440 Geel, Belgium