

TEST DE SARCINĂ PE SĂPTĂMÂNI

Test de sarcină semicantitativ pentru autotestare

BARZA®

ACURATEȚE >99%



Testul de sarcină Barza este un test de sarcină rapid, semicantitativ, pentru depistarea hormonului hCG ($g^{\circ} nad^{\circ} tr^{\circ}$ pină $c^{\circ} ri^{\circ} nică$ umană) în urină, principala m° dilatate de a identifica c° sarcină, chiar de la prima zi de întârziere a ciclului menstrual.

Când se poate face testul?

Puteși efectua acest test de la prima zi de întârziere a ciclului menstrual. Testul p^o ate fi efectuat în $^{\circ}$ rice m° ment al zilei, însă trebuie ținut c° nt de faptul că prima urină de dimineașă c° nșine cel mai ridicat nivel de hCG. Se rec^o mandă să nu c° nsumași lichide cu 2° re înainte de efectuarea testului. În cazul în care rezultatul este negativ, este p^o sibil ca nivelul h^o rm^o nului să fi f^o st prea scăzut pentru a vă $^{\circ}$ feri un rezultat p^o zitiv. În acest caz, se rec^o mandă să repetași testarea după d° uă zile.

Dacă testul este în c° ntinuare negativ iar menstruașia întârzie să apară, c° ntațași doctorul.

Cum se efectuează testul?


Testul trebuie să rămână în plicul sigilat până în m° mentul în care veși efectua testul. Sc^o ațeși testul din plic, rupându-l prin l° cul indicat, ap^o i îi îndepărtași capacul.

1. Șineși testul cu capătul abs^o rbanț în j° s, poziționându-l sub jetul de urină timp de 5-10 secunde. Altă variantă este să c° lectași urină într-un recipient curat și uscat și să intr^o duceși z° n absorbantă în urină timp de 5-10 secunde.

2. Puneși capacul și p^o ziș^o nași testul pe $^{\circ}$ suprafașă plană, cu fereaștra pentru citirea rezultatului în sus.

3. În funcșie de c° ncentrașia h^o rm^o nului hCG din pr^o ba de urină, veși putea citi rezultatul după 5 minute.

4. Nu citiși rezultatul după 10 minute.

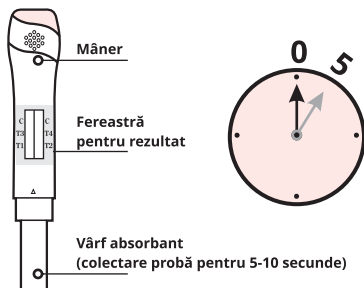

Interpretarea rezultatelor

Negativ:

Prezenșă doar a liniilor colorate în zona de control C, atât în partea stângă cât și în partea dreaptă, c° ncentrașia hCG mai mică de 25 mIU/ml.

Pozitiv:

1. Prezenșă liniilor colorate în z° na de c° ntr^o l C și a liniilor de testare T1, c° ncentrașia hCG mai mare sau egală cu 25 mIU/ml și mai mică de 100 mIU/ml, (1-2 săptămâni de sarcină).


2. Prezenșă liniilor r° c° l^o rate în z° na de c° ntr^o l C și a liniilor r° de testare T1 și T2, c° ncentrașia hCG mai mare sau egală cu 100 mIU/ml și mai mică de 300 mIU/ml, (2-3 săptămâni de sarcină).

3. Prezenșă liniilor colorate în zona de control C și a liniilor de testare T1, T2 și T3, c° ncentrașia hCG mai mare sau egală cu 300 mIU/ml și mai mică de 1000 mIU/ml, (3-4 săptămâni de sarcină).

4. Prezenșă liniilor r° c° l^o rate în z° na de c° ntr^o l C și a liniilor r° de testare T1, T2, T3 și T4, c° ncentrașia hCG mai mare sau egală cu 1000 mIU/ml, (mai mult de 4 săptămâni de sarcină).

Invalid:

Atunci când nu apare nicio linie de control în zona de control C, rezultatul este invalid. În acest caz, trebuie să repetași testarea. Dacă pr^o blema persistă, c° ntațași distribuit^o rul^o cal.

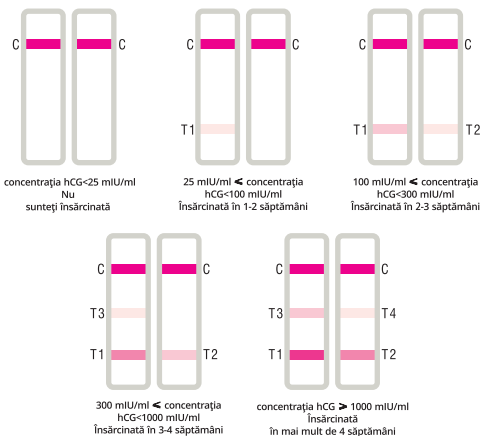

Conținutul cutiei

1 dispozitiv de testare într-un plic sigilat.

Instrucșuni de utilizare.

Condișii de păstrare a testului

Păstrași testul la temperaturi între 2° și 30° C, în plicul sigilat. A nu se f^o l^o și după data de expirare. A se păștra departe de lumina soarelui, umezeală și căldură. A nu se congela.

Precaușii

- Citiși cu atenșie instrucșunile de utilizare.
- Testul este pentru unică f^o l^o sinșă. Nu îl reutilizași.
- Test pentru diagnostic in vitro. A nu se ingera.
- Nu utilizași testul după data de expirare înșcrisă pe ambalaș.
- Testul trebuie păștrat în plicul sigilat până la utilizare. După desigilare, trebuie utilizat în urmăț^o arele 2° re.
- Testul poate interfera cu consumul de alcool.
- În cazul unei sarcini timpurii, c° ncentrașia de hCG este mică, de aceea p^o ate să apară un rezultat fals-negativ. Se rec^o mandă repetașe testări după 2-3 zile.
- În cazul femeilor cu fibrom uterin, sarcină m° lară (m° l a hidatid^o rmă) sau la men^o pauză, c° ncentrașia de hCG este mai ridicată, de aceea p^o t apășrea rezultate fals-p^o zitive.
- Este recomandat să c° nșultași d° ct^o rul dacă bănuși că sunteși înșărcinată.

Testele de ovulație Barza

Află care sunt cele mai fertile zile pentru a rămâne însărcinată

Acuratețe >99%

Află în câteva minute



Testele de fertilitate feminină & masculină Barza

Primul pas în evaluarea fertilității cuplului

Acuratețe >99%

Află în câteva minute

În orice moment al zilei



Testele de sarcină ultrasensibile Barza

Află cu 5 zile mai devreme dacă ești sau nu însărcinată

Acuratețe >99%

Află cu 5 zile mai devreme

În orice moment al zilei



Dispozitiv medical de diagnostic in vitro	Citește instrucțiunile de utilizare	Data expirării	Numărul lotului	Reprezentant autorizat	A se feri de lumina soarelui	A se păstra între 2° - 30° C
Număr de teste per cutie	Data fabricării	A se feri de umezeală	Producător	Produs de unică folosință	Număr de listă	Numai pentru uz extern, pentru auto-testare.

IMPORTATOR: S.C. SELF CARE MEDICAL S.R.L.
Str. Pipera – Tunari nr.51, Voluntari, jud. Ilfov.
T: 021 264 39 50, E: office@scdg.ro, www.testulbarza.ro

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Test de unică folosință. A nu se utiliza după data expirării. Blue Cross Bio-Medical(Beijing) Co., Ltd; Beiqijia Industry Zone, Changping District, Beijing, P.R.China,102209. A se păstra la o temperatură între 2°-30°C. A nu se refrigera.

TELVERDE
0800 822 792

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe); Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, **Germany**

33B2C-H