

# TEST DE OVULAȚIE

25mIU/ml

# BARZA®

ACURATEȚE >99%



**Testul de ovulație Barza** este un test **rapid** care depistează prezența hormonului luteinizant (**LH**) în urină, pentru a afla care este cea mai bună perioadă în care puteți rămâne însărcinată.

## CONȚINUTUL CUTIEI

- > 3/5 teste de ovulație de tip bandă;
- > Instrucțiuni de utilizare.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- > Pregătiți un recipient curat și uscat pentru colectarea urinei;
- > Pentru a se efectua testarea, dispozitivul și urina trebuie să fie la temperatura camerei (15°C-30°C).
- > Luați un ceas pentru a contoriza timpul necesar până la citirea rezultatului;
- > Verificați data expirării, înscrisă pe cutie. A nu se utiliza după această dată!
- > Nu folosiți testul dacă plicul este perforat sau desigilat;
- > Scoateți testul din plic chiar înainte de utilizare;
- > Nu este recomandată testarea în primele ore ale dimineții;
- > Reduceți cantitatea de lichide consumate cu 2 ore înaintea testării;
- > Testarea se va face în fiecare zi, la aproximativ aceeași oră.

## IMPORTANT: Testul este de unică folosință!

Pentru a stabili data începerii testării, trebuie să știți care este durata normală a ciclului dvs. menstrual. Aceasta se calculează din prima zi de menstruație până în ultima zi dinaintea următoarei menstruații. Dacă ciclul dvs. menstrual nu este regulat, luați în calcul cel mai scurt ciclu din ultimele 3 luni.

## METODA 1

Alegeți durata ciclului dvs. menstrual din prima coloană a tabelului alăturat. Pe aceeași linie, în coloana a doua este trecut ziua în care veți începe testarea, luând în calcul prima zi de menstruație.

DURATA CICLULUI MENSTRUAL	ZIUA ÎN CARE SE ÎNCEPE TESTAREA	DURATA CICLULUI MENSTRUAL	ZIUA ÎN CARE SE ÎNCEPE TESTAREA
21 de zile	ziua 5	31 de zile	ziua 15
22 de zile	ziua 6	32 de zile	ziua 16
23 de zile	ziua 7	33 de zile	ziua 17
24 de zile	ziua 8	34 de zile	ziua 18
25 de zile	ziua 9	35 de zile	ziua 19
26 de zile	ziua 10	36 de zile	ziua 20
27 de zile	ziua 11	37 de zile	ziua 21
28 de zile	ziua 12	38 de zile	ziua 22
29 de zile	ziua 13	39 de zile	ziua 23
30 de zile	ziua 14	40 de zile	ziua 24

## Exemplu:

Durata ciclului dvs menstrual este de 28 de zile. Prima zi a ciclului menstrual este 2 octombrie. Data probabilă a următoarei menstruații este 30 octombrie.

Conform tabelului de la **metoda 1**, trebuie începută testarea pe 13 octombrie. Același rezultat se poate obține și prin:

## METODA 2

Din 30 (data următoarei menstruații), se scad 17 zile și se obține ca primă zi de testare data de 13 octombrie.

## EFFECTUAREA TESTULUI

- > Colectați urina într-un recipient curat și uscat.
- > Scoateți testul din plic și aruncați desicantul.
- > **Introduceți testul în urină cu vârful săgeții în jos, până la linia marcată cu MAX, timp de 3 secunde.**
- > **Nu lăsați nivelul de urină să depășească linia marcată cu MAX, altfel testul nu va fi executat corect.**



## CITIREA REZULTATULUI

Așezați testul pe o suprafață plană, curată, uscată și neabsorbantă și așteptați 5 minute afișarea rezultatului. Rezultatul citit după 5 minute nu va fi considerat corect.



## REZULTAT NEGATIV

Apariția unei singure linii roșii în zona de control (C) sau apariția acesteia însoțită de linia de testare (T) mai deschisă la culoare.



## REZULTAT POZITIV

Apariția a două linii roșii de aceeași intensitate sau linia de testare (T) mai închisă la culoare.



## TESTUL NU ESTE VALID

Dacă în 5 minute nu apare nicio linie în zona de control (C) sau apare doar linia de testare (T).



## CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

Acuratețe: 99,8%.


Testul de ovulație Barza detectează hormonul luteinizant (LH) în urină la un nivel egal sau mai mare de 25mIU/ml.

# TEST DE OVULAȚIE

25mIU/ml

# BARZA®

ACURATEȚE >99%

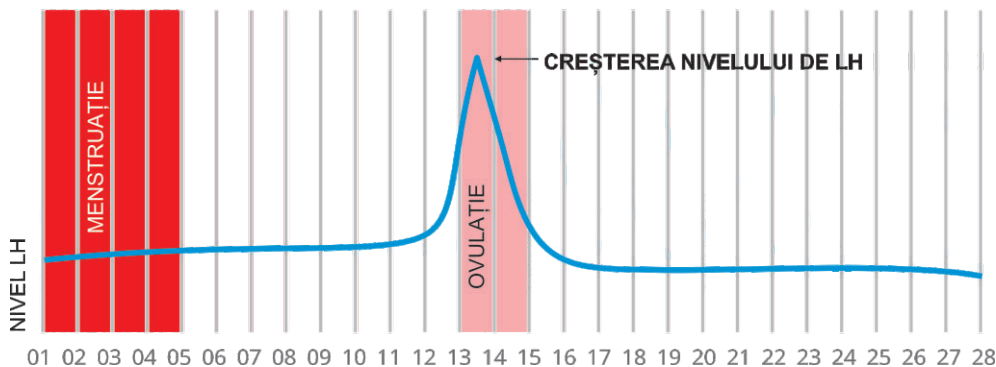

## ÎNTREBĂRI FRECVENTE

### 1. Dacă testul este pozitiv, care este cea mai bună perioadă pentru a rămâne însărcinată?

În următoarele 48 de ore, șansele să rămâneți însărcinată sunt maxime.

### 2. Pot folosi Testul de ovulație Barza ca o metodă contraceptivă?

Nu, testele de ovulație nu reprezintă o metodă contraceptivă. Sperma rămâne viabilă până la 72 de ore, în vreme ce testul de ovulație poate detecta nivelul ridicat de LH doar cu 24-48 de ore înainte de ovulație.

Din acest motiv, dacă aveți relații sexuale înainte de a obține un rezultat pozitiv, țansele să rămâneți însărcinată sunt mari.

### 3. Cum procedez dacă am făcut deja 5 teste de ovulație fără a obține un rezultat pozitiv?

În cele mai multe cazuri, 5 teste sunt suficiente pentru a determina perioada corectă a ovulației. Totuși, nu toate femeile au ovulație exact la jumătatea ciclului menstrual. De aceea, se recomandă continuarea procedurii de testare până la obținerea unui rezultat pozitiv.

### 4. Cum procedez dacă am făcut 8 teste de ovulație fără a obține un rezultat pozitiv?

Peste 90% dintre femeile cu ciclul menstrual regulat vor obține

un rezultat pozitiv după 8 zile de testare.

Dacă ciclul menstrual din această lună este mai scurt, este posibil ca ovulația să se fi produs înainte să se înceapă testarea. Dacă ciclul menstrual din această lună este mai lung, este posibil să nu fi avut ovulația încă. Se recomandă repetarea testării din nou luna următoare.

Dacă nu obțineți un rezultat pozitiv timp de câteva luni la rând, este recomandat să consultați un medic de specialitate.

### 5. Ce factori pot influența rezultatul?

Medicamentele care conțin hCG sau LH pot determina un rezultat fals-pozitiv. De asemenea, testul nu este relevant dacă sunteți însărcinată, la menopauză sau urmați un tratament de fertilitate.

În acest ultim caz, consultați-vă cu medicul dvs. cu privire la efectul medicamentelor asupra testului de ovulație.

Contraceptivele care nu conțin hCG sau LH, antibioticele, precum și în consumul de alcool nu influențează precizia testului.

### 6. Cantitatea de lichide consumată poate afecta rezultatul?

Pentru o mai bună precizie a testului, vă recomandăm să reduceți cantitatea de lichide consumate cu două ore înaintea testării.

Dispozitiv medical de diagnostic in vitro	Citește instrucțiunile de utilizare	Data expirării	Numărul lotului	Reprezentant autorizat	A se feri de lumina soarelui	A se păstra între 4° - 30° C
Număr de teste per cutie	Data fabricării	A se feri de umezeală	Producător	Produs de unică folosință	Număr de listă	Numai pentru uz extern, pentru auto-testare.

IMPORTATOR: S.C. SELF CARE MEDICAL S.R.L.  
Str. Pipera - Tunari nr.51, Voluntari, jud. Ilfov.  
T: 021 264 39 50, E: office@scdrg.ro, [www.testulbarza.ro](http://www.testulbarza.ro)

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Test de unică folosință. A nu se utiliza după data expirării. Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., No. 8, Lizhishan Road, Science City, Luogang district, Guangzhou, Guangdong, PRC (510663). A se păstra la o temperatură între 4-30°C. A nu se refrigera.

Qarad b.v.b.a., Ciplastraat 3, B-2440 Geel, Belgium

W2-S

**TELVERDE**  
**0800 822 792**